

# ALLFLEX

BIOPTOORMERKEN

1

Doe de oormerken in de oren van het kalf



2

U heeft nu één biopt voorzien van een kleurloze vloeistof



3

Voor **BVD- en DNA-onderzoek** stop het buisje in het plastic zakje en stuur dit naar de **GD**

*Voeg het GD-inzendformulier toe of schrijf digitaal in via GD Vee-Online. Dit is voor het BVD-onderzoek*



4

Voor **alleen DNA-onderzoek** stop het buisje in het plastic zakje en stuur dit naar **CRV**



5

De monsters komen aan in het laboratorium



6

De monsters worden onderzocht in het laboratorium



7

De BVD-uitslag volgt via de GD, de DNA-merkeruitslag via CRV



# BFLEX

BIOPTOORMERKEN

1

Doe de oormerken in de oren van het kalf



2

U heeft nu twee biopten



3

Stop het **witte buisje** in het plastic zakje en stuur dit in een envelop naar de **GD** of **BFlex**

*Laat u het BVD-onderzoek bij de GD uitvoeren, voeg dan het GD-inzendformulier toe of schrijf digitaal in via GD Vee-Online.*



4

Stop het **roze buisje** in het plastic zakje en stuur dit in een envelop naar **CRV**

*Dit is voor het DNA-merkeronderzoek*



5

De monsters komen aan in het laboratorium



6

De monsters worden onderzocht in het laboratorium



7

De BVD-uitslag volgt via de GD, de DNA-merkeruitslag via CRV

